

# **Anleitung zum Selbsttest**

# Vorbereitung 1



1 verpacktes Testkästchen



1 verpacktes Teststäbchen



1 Verschlusskappe des Teströhrchens

werden vom Lehrer auf die einzelnen Testplätze gelegt

# Vorbereitung 2




Alle Testpersonen waschen und desinfizieren vor Beginn des Tests ihre Hände. Bitte Maske tragen und auf Abstand achten! Den Raum gut durchlüften.

# Vorbereitung 3



Die Teströhrchen werden vom Lehrer mit 10 Tropfen der Flüssigkeit befüllt

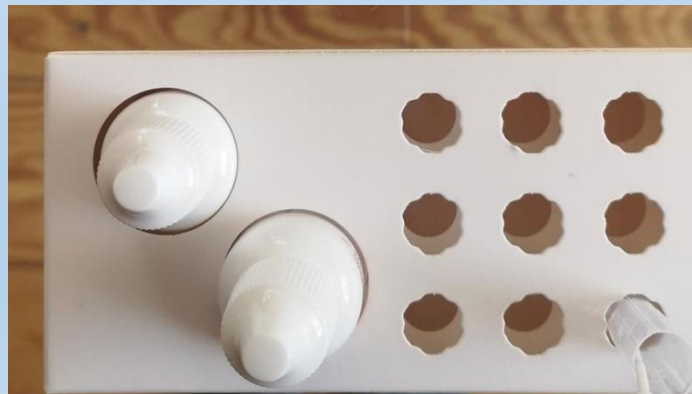

und in den Sammelbehälter gestellt.

# Vorbereitung 4



Die Schüler nehmen den Test aus der Verpackung



und schreiben mit einem Kugelschreiber oder Fineliner ihre Initialen darauf.

# Test

## Schritt 1



a) Die Schüler nehmen das Stäbchen aus der Verpackung.

**Achtung: Bitte nicht den Filz berühren!**

b) Das Stäbchen wird ca. 2cm in die Nase eingeführt.

c) Nun 4-5 Mal mit dem Stäbchen nacheinander in beiden Nasenlöchern kreisen.


# Test

## Schritt 2

- a) Die Schüler halten das Stäbchen fest während der Lehrer die Teströhrchen austeilte.
- b) Nun das Stäbchen mit dem Filz in das Teströhrchen stecken.




- c) Dann das Stäbchen zwischen Daumen und Zeigefinger ca. 10 Mal in der Flüssigkeit kreisen lassen.

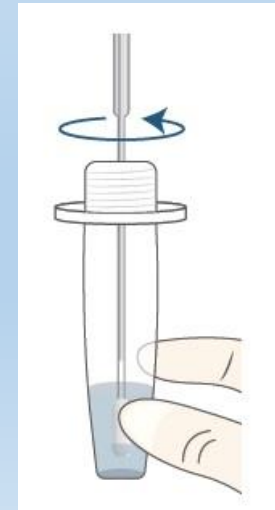

# Test

## Schritt 3

- a) Das Stäbchen wieder herausnehmen und auf die Verpackung legen.
- b) Die Verschlusskappe auf das Teströhrchen stecken.

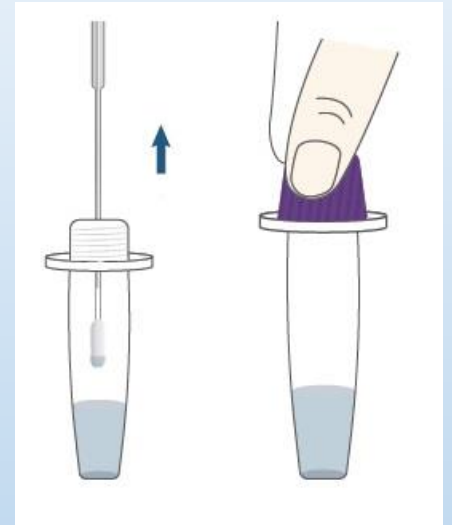

- c) Ca. 4 Tropfen der Flüssigkeit in die runde Aussparung des Tests tröpfeln.





# Test

## Schritt 4




Nun mindestens 15 Minuten (höchstens 30 Minuten) warten.

# Testergebnisse



15 - 30 min

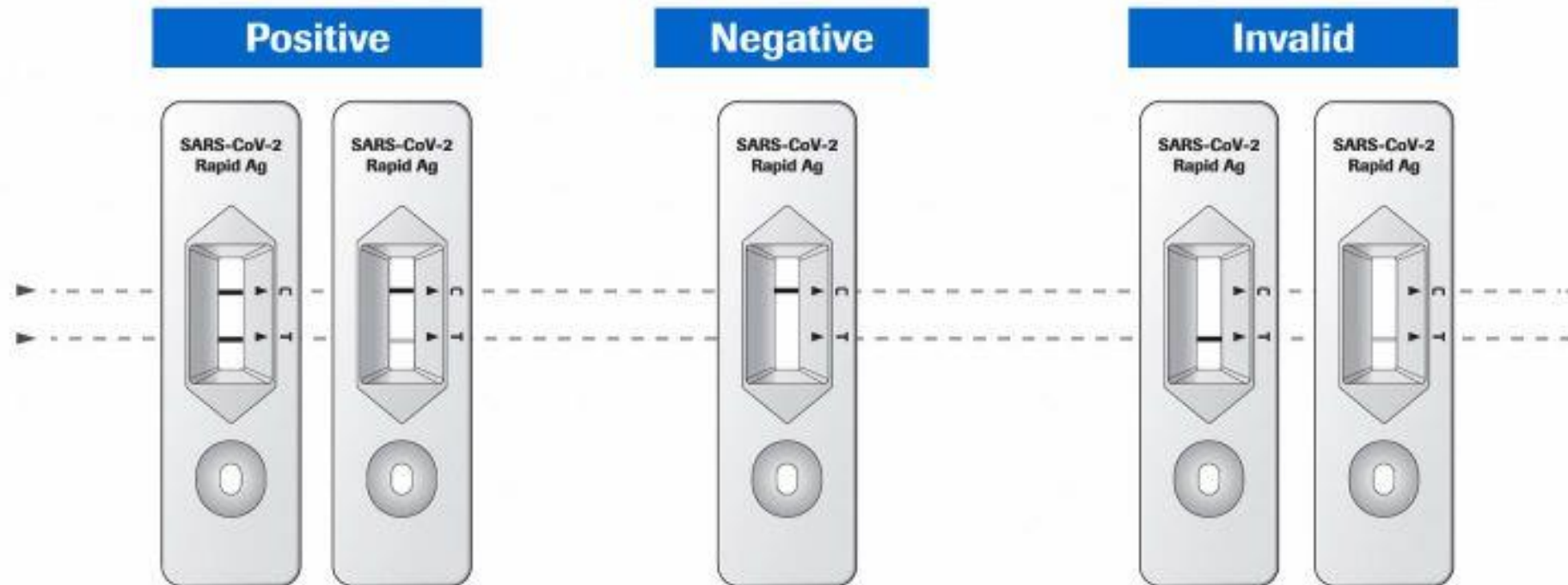

# Dokumentation

1. Positive Ergebnisse müssen auf dem Protokollbogen vermerkt werden.
2. Den Protokollbogen bitte im Sekretariat abgeben.
3. Die Belehrung der SuS über die Durchführung des Selbsttest ist im Klassenbuch farbig zu vermerken.